

## Wichtig

Nimm dir Zeit die Anleitung sorgfältig zu lesen, bevor du beginnst.

### Dein Vaginalabstrich-Set:

A Wattestäbchen im Röhrchen (Abstrich-Set)

A



## Tip

Die Abnahme ist leichter, wenn du dabei in die Hocke gehst oder einen Fuß auf eine Erhöhung (z.B. Stufe) stellst.

## Vorbereitung


### 01 Hände waschen

Hände mit Wasser und Seife waschen.



### 02 Abstrich-Set öffnen

Das Wattestäbchen durch eine Drehung aus dem Röhrchen ziehen.

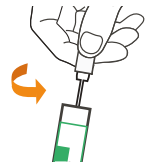

## Probenentnahme


### 03 Wattestäbchen einführen

Mit einer Hand Schamlippen spreizen, mit der anderen Hand Wattestäbchen 5 cm einführen.



### 04 Abstrich durchführen


Sicherstellen, dass das Wattestäbchen die Scheidenwand für ca. 10-15 Sekunden berührt.

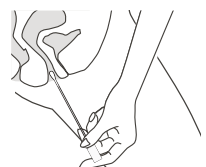

## 05 Abstrich-Set verschließen

Das Wattestäbchen zurück in das Röhrchen stecken. Zum Verschließen des Röhrchens die Kappe fest aufdrücken.

Zusammen mit den anderen Proben in den Patientenproben-Beutel stecken und mit dem ausgefüllten Probenschein versenden.

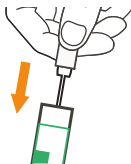

## Test auf Chlamydien & Gonorrhö

Chlamydien und Gonorrhö (Tripper) sind behandelbare Infektionen, die in Vagina/Penis, Rachen und im Anus vorkommen können.

Wir werden dir die Ergebnisse per Telefon mitteilen und dich auf Wunsch unterstützen und beraten.

Bei einem positiven Befund, solltest du für die Behandlung einen Arzt aufsuchen.

Für mehr Informationen zu Chlamydien und Gonorrhö gehe zu: [www.samtest.de](http://www.samtest.de)

**Telefon-Hotline**

(Mo-Do 10:00-16:00, Fr 10:00-15:00)

**030 690 087 90**

**Mehr Informationen**

**[www.samtest.de](http://www.samtest.de)**