

Wichtig

Nimm dir Zeit die Anleitung sorgfältig zu lesen, bevor du beginnst.

Dein Rachenabstrich-Set:

A Wattestäbchen im Röhrchen (Abstrich-Set)

A




Tipp

Streiche einfach großflächig mit dem Wattestäbchen über die hinteren Bereiche im Rachen, die unten dargestellten Punkte müssen nicht exakt getroffen werden.

Vorbereitung


01 Hände waschen

Hände mit Wasser und Seife waschen.

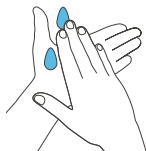

02 Abstrich-Set öffnen

Das Wattestäbchen durch eine Drehung aus dem Röhrchen ziehen.

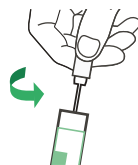

Probenentnahme

03 Wichtige Bereiche im Rachen


Die farbigen Punkte zeigen die Bereiche für den Abstrich an.



04 Abstrich durchführen

Das Wattestäbchen mit geringem Druck über die in der Abbildung gekennzeichneten Regionen im Rachen streichen.


Dabei kann ein leichter Würgereiz auftreten.

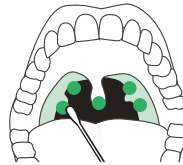

05 Abstrich-Set verschließen

Das Wattestäbchen zurück in das Röhrchen stecken. Zum Verschließen des Röhrchens die Kappe fest aufdrücken.

Zusammen mit den anderen Proben in den Patientenproben-Beutel stecken und mit dem ausgefüllten Probenschein versenden.

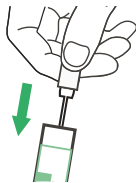

Test auf Chlamydien & Gonorrhö

Chlamydien und Gonorrhö (Tripper) sind behandelbare Infektionen, die im Rachen, im Anus und in Penis/Vagina vorkommen können.

Wir werden dir die Ergebnisse per Telefon mitteilen und dich auf Wunsch unterstützen und beraten.

Bei einem positiven Befund, solltest du für die Behandlung einen Arzt aufsuchen.

Für mehr Informationen zu Chlamydien und Gonorrhö gehe zu: www.samtest.de

Telefon-Hotline

(Mo-Do 10:00-16:00, Fr 10:00-15:00)

030 690 087 90

Mehr Informationen

www.samtest.de